


# SleeperOne® DENTAL HI TEC

## Функции беспроводной педали

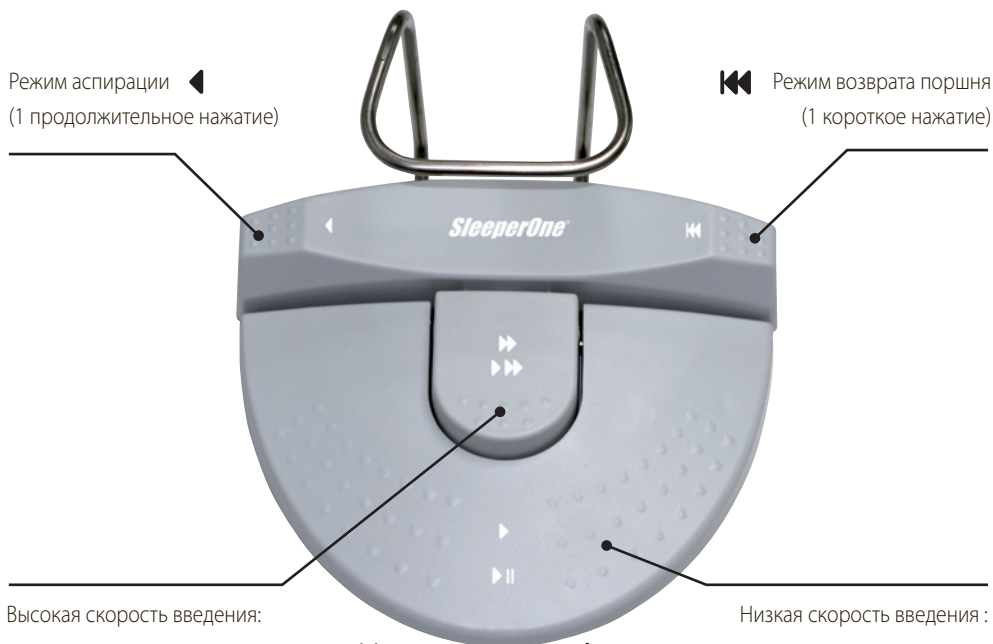

Режим аспирации ◀  
(1 продолжительное нажатие)

◀◀ Режим возврата поршня  
(1 короткое нажатие)

Высокая скорость введения:

- Инfiltrационная/проводниковая: ▶▶  
"Высокая постоянная скорость введения"  
двойное нажатие\* (1 короткое нажатие  
+ 1 продолжительное нажатие)
- Инfiltrационная/проводниковая: ▶▶▶  
"Высокая прогрессирующая скорость  
введения" (1 продолжительное нажатие)

Низкая скорость введения :

- ▶ - Интралигаментарная/интрасептальная:  
"Низкая автоматически прогрессирующая  
скорость" двойное нажатие\*  
(1 короткое нажатие + 1 продолжи-  
тельное нажатие)
- ▶|| - Прикрепленная слизистая/небная:  
"Низкая постоянная скорость"  
(1 продолжительное нажатие)

\* Два способа выполнить двойное нажатие

**1/ Введение в процессе:** отпустите педаль максимум на 2 сек. + 1 продолжительное нажатие

**2/ Вы еще не приступили к введению:** 1 короткое нажатие + 1 продолжительное нажатие. В подтверждение вы услышите двойной звуковой сигнал.

**Внимание:** режим двойного нажатия отключается, если педаль отпущена больше, чем на 2 сек. (подтверждается одиночным звуковым сигналом). Более подробная информация о режиме двойного нажатия - в руководстве пользователя.

**Нужна более подробная информация? Загляните на стр.8 руководства пользователя или свяжитесь с нами [info@tsdental.ru](mailto:info@tsdental.ru) или [sleeperone@dentalhitec.com](mailto:sleeperone@dentalhitec.com)**

# SleeperOne® DENTAL HI TEC

## Функции беспроводной педали

Режим аспирации ◀  
(1 продолжительное нажатие)

◀◀ Режим возврата поршня  
(1 короткое нажатие)



Высокая скорость введения:

- Инфильтрационная/проводниковая: ▶▶  
“Высокая постоянная скорость введения”  
двойное нажатие\* (1 короткое нажатие  
+ 1 продолжительное нажатие)
- Инфильтрационная/проводниковая: ▶▶▶  
“Высокая прогрессирующая скорость  
введения” (1 продолжительное нажатие)

\* Два способа выполнить двойное нажатие

**1/ Введение в процессе:** отпустите педаль максимум на 2 сек. + 1 продолжительное нажатие.

**2/ Вы еще не приступили к введению:** 1 короткое нажатие + 1 продолжительное нажатие. В подтверждение вы услышите двойной звуковой сигнал.

**Внимание:** режим двойного нажатия отключается, если педаль опущена больше, чем на 2 сек. (подтверждается одиночным звуковым сигналом).

Более подробная информация о режиме двойного нажатия - в руководстве пользователя.

Низкая скорость введения:

- ▶ - Интралигаментарная/интрасептальная:  
“Низкая автоматически прогрессирующая  
скорость” двойное нажатие\*  
(1 короткое нажатие + 1 продолжительное  
нажатие)
- ▶|| - Прикрепленная слизистая/небная:  
«Низкая постоянная скорость»  
(1 продолжительное нажатие)

**Нужна более подробная информация? Загляните на стр.8 руководства пользователя или свяжитесь с нами [info@tsdental.ru](mailto:info@tsdental.ru) или [sleeperone@dentalhitec.com](mailto:sleeperone@dentalhitec.com)**